

SZÁJNYÁLKAHÁRTYA-TÖRLET VÉTELE GENETIKAI ÉS APASÁGI VIZSGÁLATOKHOZ TASAKOS COPAN FLOQSWABS MINTAVEVŐVEL MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ PARTNEREINK SZÁMÁRA



hDNA Free FLOQSwabs® (Copan), cikkszám: 50U002DS01

A páciens/ügyfél a mintavétel előtt közvetlenül ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon, mert ez a vizsgálat sikertelenségét eredményezheti.

MINTAVÉTEL

1. Töltse ki a kérőlapot.
2. A mintavevő eszköz tasakjára legelőször írja rá diagnosztikai vizsgálat esetén a páciens nevét, valamint születési idejét vagy TAJ-számát, apasági vizsgálat esetén a jeligét és a rokonságot (feltételezett apa, gyerek, stb.)
3. Vegyen fel gumikesztyűt.
4. A steril csomagolású mintavevőt a nyél felől vegye ki a csomagolásból. Ezen a végén a tasak papír és műanyag oldala könnyedén széthúzható. Ügyeljen rá, hogy a bolyhos fejhez ne érjen hozzá kézzel.
5. A páciens/ügyfél nyitott szájában mindkét oldalon körkörös mozdulattal nyolcszor dörzsölje meg a szájüreg belső felületét (a fogsoron kívül, a pofa belső oldalán). Közben még tengelye körül is forgassa a pálcát. Érdemes kívülről ellentartani az arcbőrt, különösen gyermekek esetén.
6. Ezután helyezze vissza a mintavevőt a csomagolásába, továbbra is ügyelve arra, hogy a bolyhos fej semmihez ne érjen hozzá. Jegyzőkönyves apasági vizsgálat esetén személyenként 2 db mintára van szükség.
7. A tasakba visszatett mintavevő(ke)t helyezze egy külső megcímezett borítékba.

A levett minta szobahőmérsékleten tárolandó és környezeti hőmérsékleten szállítható. 5 napon belül a laboratóriumba kell érkeznie.

Igénylés: raktarozas@synlab.com

Valamennyi genetikai és apasági vizsgálatához megfelel a vérminta is az alábbiak szerint:

Szükséges minta:

1 cső EDTA-val alvadásgátolt vér (lila kupakos, „vérképes” cső).

Mintavétel:

standard módon, a szakma szabályai szerint

Tárolás:

szobahőn 1 nap, 2-8 °C-on 4 nap, -20 °C-on 1 hónap. Kerülni kell az ismételt fagyasztást-olvasztást.