

HÜVELYKENET BEKÜLDÉSÉNEK MÓDJA

1. Kenettartó műanyag doboz és a mattírozott tárgylemez a Synlab Hungary Kft. mikrobiológiai laboratóriumaiból igényelhetők. Ezek tárolásra és szállításra alkalmasak, többször használatosak, a jövőben forognak majd az adott laboratórium és az adott beküldő partner között.
2. 2 db tárgylemez mattírozott részére grafitceruzával kell ráírni a páciens adatait:
 - a. páciens nevét (nem elég a monogram)
 - b. valamint még egy azonosítóját (születési dátum vagy TAJ szám)

Mindkét tárgylemezen fel kell tüntetni ezeket az adatokat! Kérjük, ne alkoholos filctollal és ne ráragasztott papírra írják a páciens azonosítót, mert ezek a festéskor zavaróak lehetnek.

3. A hüvelyboltozatból levett váladékot gumikesztyűs ujjal kell kikenni a tárgylemeznek arra a felére, amelyikre a páciens adatai kerültek.
4. **A tárgylemezeket a műanyag kenettartóba kell helyezni a 2 külön mélyedésbe 1-1 tárgylemezt.**
5. A kenettartót nyitva kell hagyni, így levegőn megszárítani a keneteket.
6. Egy kenettartóba kizárólag egy páciens keneteit helyezték! Ne fektessék össze két páciens mintáit.
7. **Ha teljes mértékben megszáradtak a kenetek, akkor kell becsukni a kenettartót.**
8. **A kenettartóra kívülről ne írják rá a páciens nevét!** A műanyag kenettartók nem egyszerhasználatosak; fertőtlenítés után újra kiküldjük és felhasználhatóak, ezért **a kenettartón célszerűen a beküldő intézmény neve kerül feltüntetésre.**
9. Az aerob baktérium tenyésztés céljára a transzport közegbe levett hüvelyváladékot a szokásos módon kell beküldeni, **együtt a kenetekkel.**
10. **Egyetlen kériólapot** kell küldeni egy páciens tenyésztés és mikroszkópos vizsgálatához, hogy egyben tudja a laboratórium értékelni az eredményeket, melyeket egy leleten kell feltüntetnünk.
11. A kériólapon jelölni kell:
 - a. a minta típusát (hüvelyváladék).
 - b. a vizsgálatokat:
 - i. Direkt kenet mikroszkópos vizsgálata és
 - ii. Baktérium tenyésztés és rezisztencia